


安全なマスクの着け方と外し方

着け方

point

鼻と口、あごまで
きちんと覆う!

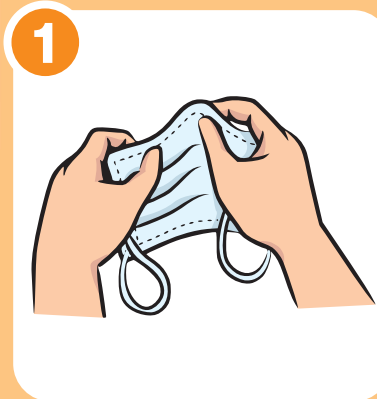

1 ノーズピース部分に
折り目をつける



2 ゴムヒモを耳にかける



3 針金を顔の形に合わせる



4 蛇腹をあごの下まで
伸ばし鼻と口を覆う

外し方



1 表面に触れないように
ゴムヒモを外す



2 表面に触れないように
ゴムヒモを持って捨てる

point

- マスクの表面に触れないように外して、捨てる!
- マスクを外した後手指衛生を行う
- 衛生的に使用するため、適時交換する

